

PALA®



Pala Patientenpass für Zahnprothesen

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Eingewöhnung und Pflege.

Eingewöhnung

Selbst mit der besten Prothese brauchen Sie etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Der Gaumen, die Zunge und die Kaumuskelatur passen sich nach und nach der neuen Situation an. Kauen und Sprechen kann sich anfangs ungewohnt anfühlen. Es ist wichtig die Prothese trotzdem weiterhin zu tragen. Geben Sie sich etwas Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Weiche Lebensmittel wie Fisch und Nudeln erleichtern Ihnen die Umgewöhnung.

Folgende Empfehlungen tragen zum Qualitätserhalt Ihrer Prothese bei:

- Besuchen Sie regelmäßig Ihren Zahnarzt
- Tägliche Prothesenreinigung – Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel (wie z. B. Haushaltsreiniger)
- Mittel wie Koffein, Teein, Nikotin können ebenso wie z. B. Fruchtsäuren in Obstsaften oder alkoholhaltige Mundspüllösungen im Laufe der Zeit zu Verfärbungen oder erhöhter Plaqueanfälligkeit führen. Lassen Sie deshalb auch regelmäßig eine professionelle Prothesenreinigung durchführen, vor allem bei regelmäßigem Genuss von Kaffee, Tee oder wenn Sie rauchen.
- Tragen Sie eine Teilprothese, lassen Sie für Ihren Restzahnbestand regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung durchführen

Denken Sie an Ihre Gesundheit.

Sollten Sie im Laufe der Zeit folgende Veränderungen bemerken, suchen Sie bitte umgehend Ihren Zahnarzt auf:

Veränderte Passform

Über einen längeren Zeitraum ist eine Veränderung der Passform normal. Eine schlechte Passform kann zu einer Beeinträchtigung der Sprache und zum Klappern der Zahnprothese führen. In gravierenden Fällen kann dies sogar Beschädigungen an der Prothese zur Folge haben. Dies kann der Zahnarzt mit Hilfe einer einfachen Unterfütterung korrigieren.

Druckstellen

In manchen Fällen kann es zur Bildung von Druckstellen auf der Schleimhaut kommen. Damit diese nicht zu Entzündungen und Infektionen führen, müssen sie vom Zahnarzt behandelt werden.

- Reparieren Sie Ihre Prothese niemals selbst
- Kontaktieren Sie bei allen Fragen rund um die Prothese Ihren Zahnarzt

Warum die Prothese sauber halten?

Die tägliche Reinigung Ihrer Prothese ist wichtig, damit darauf keine Bakterien entstehen. Dieser sogenannte Plaque sieht nicht nur unschön aus, sondern kann zu Mundgeruch sowie Entzündungen Ihres Zahnfleisches führen.

Durch gründliche Reinigung Ihrer Prothese können Sie dies vermeiden.

Achten sie besonders auf die Zahnzwischenräume, die Flächen, die dem Gaumen anliegen und jene Teile, die Kontakt mit dem Restgebiss im Mund haben. Bürsten sie diese sorgfältig für einige Minuten. Vergessen sie nicht auch das Restgebiss, Implantate und Konstruktions-elemente im Mund zu bürsten.



Wie pflege ich richtig?

- Tägliche Reinigung mit einer Prothesenbürste (aus der Apotheke od. Drogerie) oder einer weichen Zahnbürste in Verbindung mit nicht abrasiver Zahnpasta.
- Wichtig: Ohne Zahnpasta ist nur eine unzureichende Reinigung gegeben!
- Keine Aufhellungspaste, Spülmittel, Haushaltsreiniger oder chlorhaltigen Reiniger verwenden.
- Nach jeder Mahlzeit unter fließendem Wasser reinigen.
- Auch die Innenseite Ihres Mundes reinigen.
- Prothesenreinigungstabs können eine sinnvolle Ergänzung sein, ersetzen aber keine klassische Reinigung.
- Prothesen sollten nachts wenn möglich aus dem Munde genommen werden.
- Legen Sie Ihre Prothese bei Nichtgebrauch (z. B. in der Nacht) in ein Glas Wasser, da diese stets feucht gehalten werden sollte.

Tipp: Um Beschädigungen Ihrer Prothese zu vermeiden, reinigen Sie diese immer über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder legen Sie ein Handtuch hinein.

Höchste Qualität.

Gratulation zu Ihrer hochwertigen Prothese!

Patient:

A large white rectangular box used to redact the patient's name.

Ihre Prothese wurde angefertigt von:

A large white rectangular box used to redact the name of the technician who made the prosthesis.

Datum/Stempel zahntechnisches Labor

A large white rectangular box used to redact the date and stamp of the dental laboratory.

Datum/Stempel Zahnarztpraxis

Ihre neue Zahnprothese.

Verwendete Materialien

Pala Zahnlinie	Frontzähne (Form & Farbe)	Seitenzähne (Form & Farbe)	Prothesenbasis- Material

Pala® ist eine eingetragene Marke der Kulzer GmbH.

Kontakt in Deutschland:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany
info.lab@kulzer-dental.com